


# Cavios®

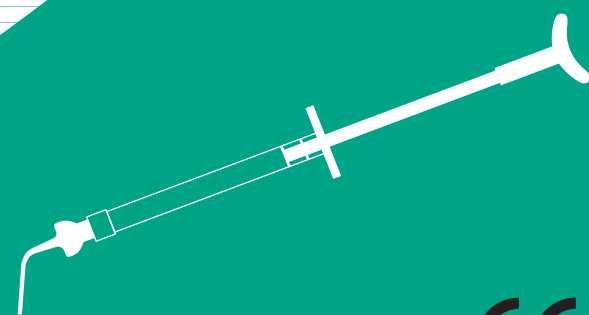

## Lichthärtende Kavitätsbasis

### Wirksamkeit

- \* Cavios ist ein lichthärtendes Auskleidungs- und Basismaterial, das Urethandimethacrylat und  $\alpha$ -Tricalciumphosphat ( $\alpha$ -TCP) enthält
- \*  $\alpha$ -TCP eignet sich besonders mit Verbindung von hartem Gewebe.
- \* Schnelle und einfache Anwendung.
- \* Praktische Spritze gestattet direkte Auskleidung ohne Instrumente.
- \* Vorgemischte Paste mit besten Eigenschaften für die Handhabung.
- \* Keine Anätzung notwendig.
- \* Hervorragende Strahlen durchlässigkeit.



### Technische Daten

HÄRZEIT	20 Sekunden
HÄRTETIEFE	2,5 mm
FLEX-KRAFT	50 MPa
KOMPRESSIONSKRAFT	165 MPa

Erhältlich über:  
**Neo Dental Chemical Prod., Co Ltd.**  
Tokyo, Japan

### Anweisungen

1. Nach Vorbereitung Kavität spülen und trocknen.
2. Bei freiliegendem pulpaem Gewebe ist eine schützende Kalziumhydroxidbasis aufzutragen.
3. Wegwefspitze anbringen.
4. Kavitätsboden direkt mit Cavios auskleiden.
5. 20 Sekunden lang lichthärten. Wird ein großer Bereich ausgekleidet, Härtungsdauer erhöhen.
6. Bei tiefen Kavitäten in Lagen von 0,5 mm auskleiden.
7. Wird Cavios unter dem harzbasierten Rekonstruktionsmaterial (Evadyne) angewandt, verwenden Sie Sepalite, um eine Verbindung zwischen dem Cavios (Auskleidung) und dem Evadyne zu verhindern. Sepalite stellt sicher, dass das Evadyne entfernt werden kann, ohne die harzbasierte Auskleidung der Kavität zu beschädigen.
8. Nach Anwendung Spitze wegwerfen und Spritze mit Kappe verschließen.

### Achtung


- Cavios nicht bei Patienten anwenden, welche in der Vergangenheit eine allergische Reaktion oder Reizung bei Cavios oder Methacrylaten aufwiesen. Kommt es zu einer Reizung, ist die Anwendung einzustellen und ein Arzt hinzuzuziehen.
- Cavios sollte nicht mit weichem Gewebe im Mund, der Haut, oder den Augen in Kontakt kommen. Kommt es zu einem Kontakt, sofort mit Wasser oder Salzlösung spülen, und einen Arzt hinzuziehen.
- Cavios nur unter den angegebenen Bedingungen verwenden.

### Lagerung

- Direktes Sonnenlicht vermeiden.
- Kühle Lagerung erhöht die Lagerdauer von Cavios.
- Das Verfallsdatum ist auf der Packung aufgedruckt.

### Packung

1.8g Spritze + 15 Spitzen

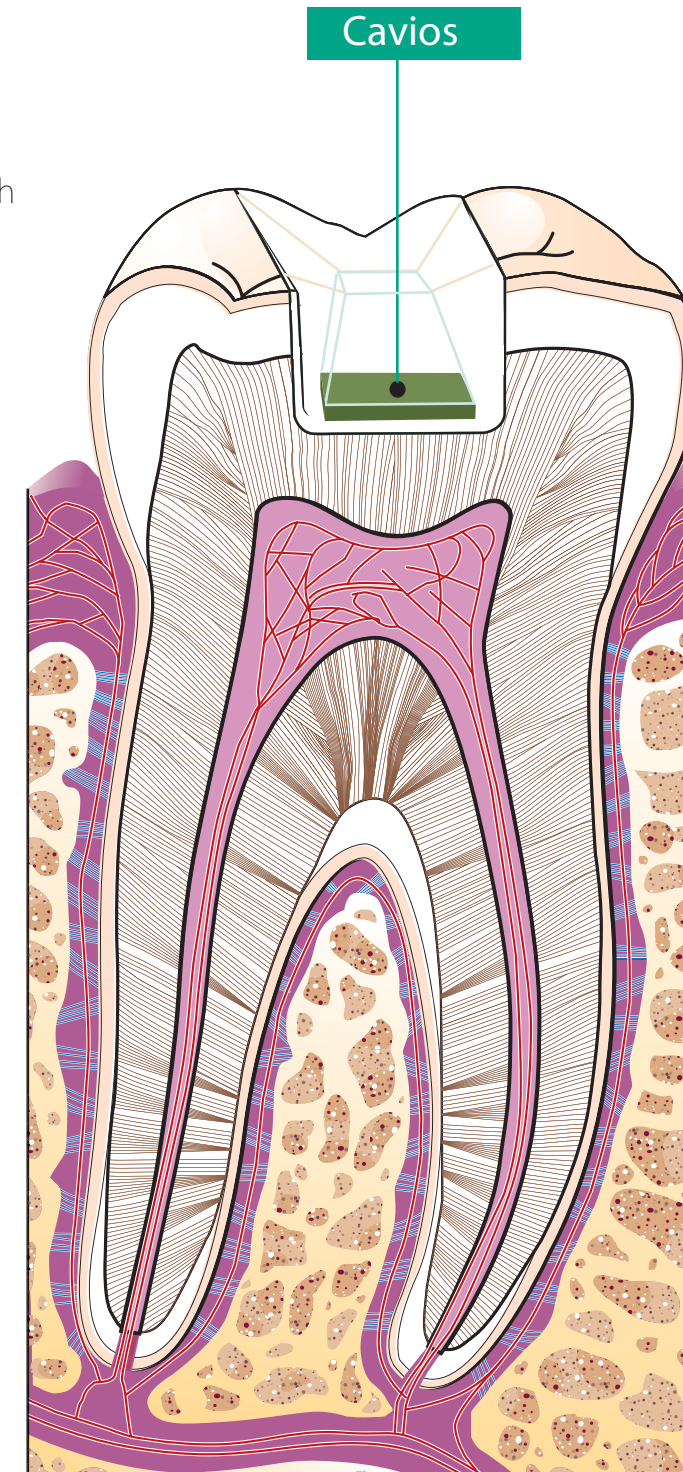

**Neo Dental International Inc.**

2505 S. 320th ST Suite 625  
Federal Way, WA 98003, USA

Tel: +1 253 946 0814  
Fax: +1 253 946 0885  
www.neodental-intl.com  
ndi@neodental-intl.com

Hergestellt durch

**Neo Dental International, Inc. USA.**