


Evadyne®

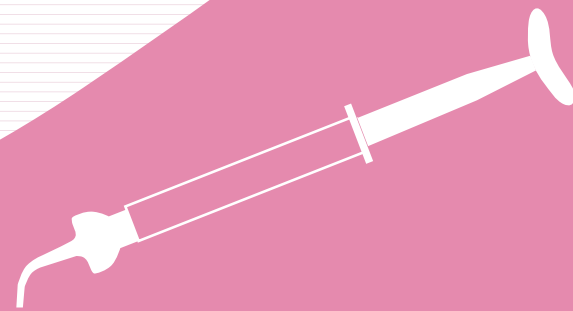

LICHTHÄRTENDES TEMPORÄRES FÜLLUNGSMATERIAL



Wirkung

- * Evadyne ist ein temporäres, lichthärtendes Versiegelungsmaterial mit Urethanharz und Fluorid freisetzendem Glasionomer.
- * Schneller und einfacher Auftrag direkt in die Kavität.
- * Praktische Spritze gestattet direkte Anwendung ohne Instrument.
- * Geschmacks- und geruchsfreies Material; löst keine Reizungen aus.
- * Gute Versiegelungseigenschaften; einfach mit einem Explorer komplett in einem Stück zu entfernen.



Technische Daten

HÄRTUNGSTIEFE	2,5 mm
FLEX-KRAFT	3,4 MPa
HÄRTUNGSDAUER	20 Sekunden

Hergestellt durch:


Neo Dental Chemical Product Co. Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 S. 320th ST Suite 625
Federal Way, WA 98003, USA

Tel: +1 253 946 0814
Fax: +1 253 946 0885
www.neodental-intl.com
ndi@neodental-intl.com

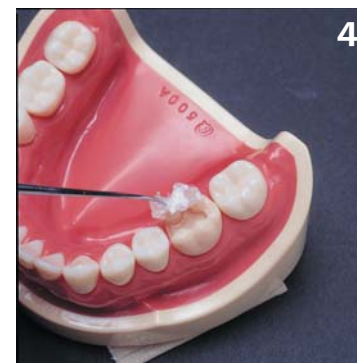

Anweisungen

1. Nach Vorbereitung, Kavität spülen und trocknen.
2. Bei freiliegendem pulpaem Gewebe ist eine schützende Kalziumhydroxidbasis aufzutragen.
3. Kavität mit Liner auskleiden
4. Kavität direkt mit Evadyne füllen. Abschlussoberfläche leicht konkav formen.
5. Vor Anpassung der Abschlussoberfläche gegenüberliegende Zähne befeuchten.
6. 20 Sekunden lang mit einer Standardhärtungslampe lichthärten. (10 Sekunden für flache Kavitäten)
7. Spitze nach jedem Patienten wegwerfen. Kappe fest auf die spritze schrauben. Für jeden Patienten neue Spitze verwenden.
8. Evadyne kann mit einem Handinstrument in einem Stück entfernt werden.

Vorsicht

- * Evadyne nicht bei Patienten anwenden, welche in der Vergangenheit eine allergische Reaktion oder Reizung bei Evadyne oder Methacrylaten aufwiesen. Kommt es zu einer Reizung, ist die Anwendung einzustellen und ein Arzt hinzuzuziehen.
- * Evadyne sollte nicht mit weichem Gewebe im Mund, der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser oder Salzlösung spülen, und einen Augenarzt aufsuchen.
- * Evadyne nur nach Anweisung verwenden.

Lagerung

- Direktes Sonnenlicht vermeiden.
- Kühle Lagerung erhöht die Lagerdauer von Evadyne.

Verpackung

- * 5 g/Spritze
- * 15 Wegwerfspitzen

Erhältlich über

Neo Dental International Inc.