


Vitapex[®]

Medicamento para canales radiculares (Radio-opaco)

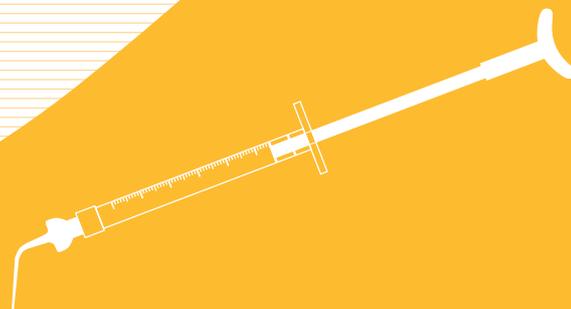

Ingredientes:

Hidróxido de Calcio 30%	Estimula las células blásticas que ayudan a la apexogénesis. El pH alto neutraliza las endotoxinas producidas por bacterias anaeróbicas.
Yodoformo 40.4%	Bacteriostático Radio-opacidad aumentada
Aceite de silicón 22.4%	Lubricante que asegura un cubrimiento completo de las paredes del canal. Nunca endurece; el hidróxido de calcio solubilizado permanece activo en el canal radicular.
Material Inerte 6.9%	
Presentación	2 gms de pasta por jeringa + 20 puntas desechables.
Almacenamiento	Almacene en un ambiente oscuro.

El **Vitapex** puede ser utilizado como material de obturación temporal o permanente para canales radiculares luego de una pulpectomía. Puede ser utilizado solo (temporal) o conjuntamente con gutapercha (permanente). También es ideal para el tratamiento de canales radiculares infectados y para pulpotomías en dientes deciduos.

References

- Thomas A.M., et al. *Elimination of infection in pulpectomized teeth: A short-term study using Iodoform Paste.* J. Endod. 1994 20(5): 233-5
- Cohen S., Burns R. *Pathways of the Pulp.* 7th Ed. 1998, Mosby.
- Eda S., et al. *Clinical pathological studies on the healing of periapical tissues in aged patients by root canal filling using pastes of Calcium Hydroxide added Iodoform.* Geriodontics 1985 1: 98-104.
- Nurko C., Garcia-Godoy F. *Evaluation of a Calcium Hydroxide / Iodoform paste (Vitapex) in root canal therapy for primary teeth.* J. Clin. Pediatr. Dent 1999 23(4): 289-294



Neo Dental International Inc.

2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814
Fax: 253-946-0885
email: ndi@neodental-intl.com

Vitapex®

Medicamento para canales radiculares (Radio-opaco)



1 prefilled syringe
containing 2.0g paste
20 disposable tips

Pasta premezclada de hidróxido de calcio con yodoformo para tratamiento de canales radiculares



Indicaciones

- Medicamento intraradicular
- Apexificación
- Control de exudado
- Lesiones periapicales
- Reabsorción radicular
- Material para obturación radicular temporal
- Perforaciones
- Dientes subdesarrollados sin pulpa

Beneficios

- Silencia el "absceso caliente"
- Desinfecta el canal
- Promueve la apexificación
- Trata lesiones traumáticas
- Radio-opaco
- Aplicación rápida y sencilla
- Antibacteriano y bacteriostático

Disponible a través de su distribuidor local

Manufactured by:
Neo Dental Chemical Product Co. Ltd.
Tokyo, Japan




Neo Dental International Inc.
2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814
Fax: 253-946-0885
email: ndi@neodental-intl.com

Preparación del Canal Radicular

- Antes de utilizar el Vitapex, limpie y prepare el canal utilizando los métodos convencionales
- Nota: El diámetro externo de la jeringa es aproximadamente equivalente a una lima # 40

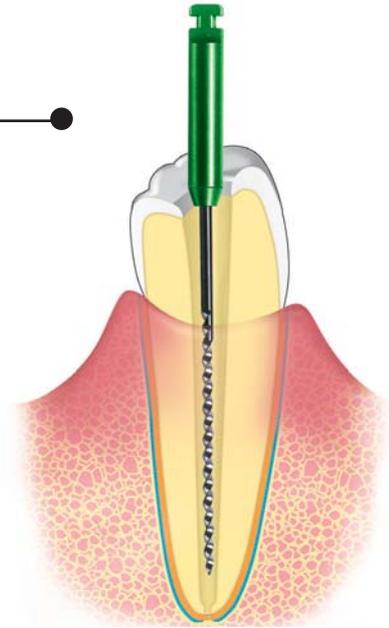


Medicamento Intraradicular Temporal

Inserte la punta o extremidad de la jeringa del Vitapex, en el quinto apical de la longitud del canal radicular

A medida que se presiona el pistón, la pasta comenzará a llegar hasta el foramen apical. En este punto, retire lentamente la jeringa.

Una vez el canal se encuentre relleno de Vitapex, complete el tratamiento colocando una restauración temporal para sellar la apertura de acceso.


El Vitapex no endurece, y puede ser removido durante una visita subsiguiente, utilizando cantidades generosas de hipoclorito de sodio y una lima, o con una punta ultrasónica.

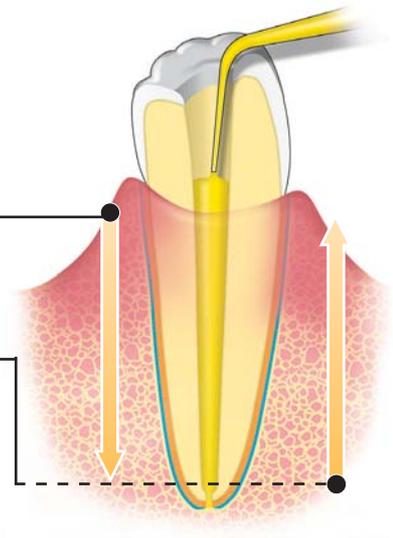

Por favor tenga en consideración que:

Cualquier cantidad de Vitapex que se coloque por debajo del foramen apical, será reabsorbido en un lapso de varias semanas.


Cuando se este tratando un absceso fulminante, cualquier cantidad de Vitapex que se coloque en el tejido periapical, neutralizará los ácidos producidos por el absceso; por lo tanto, proveerá un pronto alivio de los síntomas agudos.

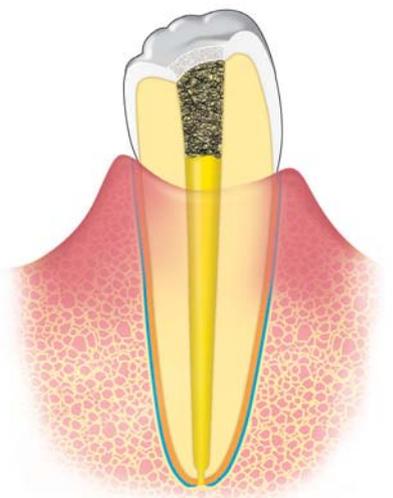

Tratamiento Permanente

Conjuntamente con gutapercha y sellante



- Para asegurar un sellado apical, coloque una pequeña cantidad de Vitapex en la porción apical del canal radicular.
- Complete la obturación, utilizando la técnica normal de gutapercha y sellante.
- Coloque una restauración permanente para sellar la apertura de acceso.

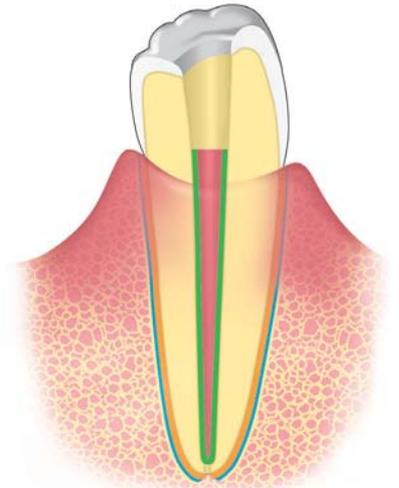

Dientes Deciduos

Inserte la punta de la jeringa cerca al ápice

Aplique el Vitapex dentro del canal radicular, hasta que se reverse hacia la cámara pulpar. En este instante, manipulación cuidadosa es indispensable, para asegurar que el Vitapex no se extruya mas allá del ápice.

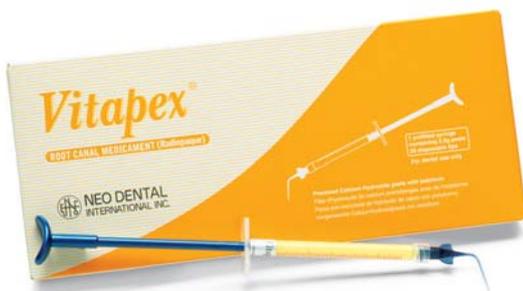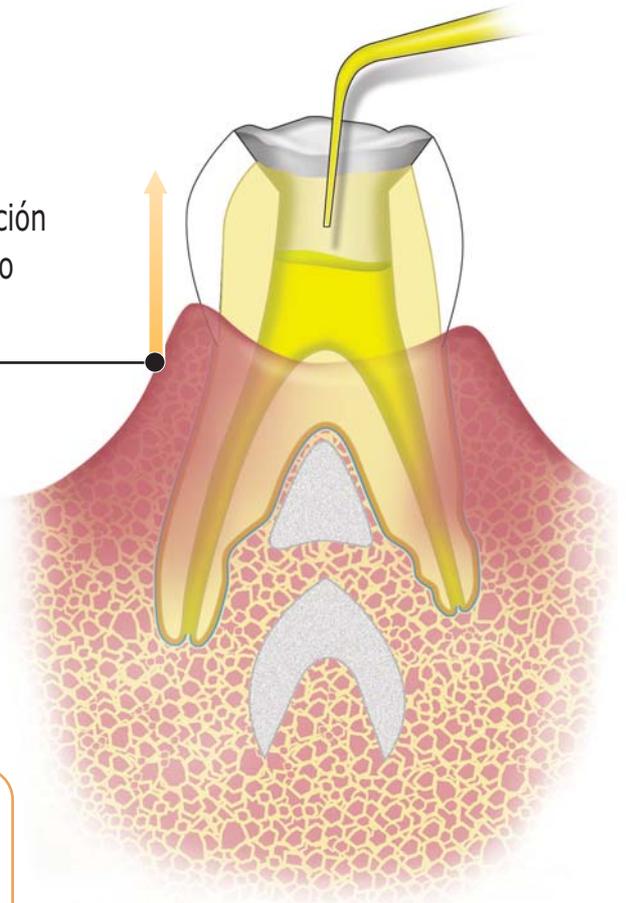

Por favor tenga en consideración que:

Las puntas desechables del Vitapex deben ser reemplazadas después de atender cada paciente

Las puntas pueden ser dobladas para lograr un fácil acceso al canal radicular