

## NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU VITAPEX

### PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU VITAPEX NASAĎTE NOVOU ŠPIČKU.

#### VPYLŇOVÁNÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ BEZ UCPÁVACÍCH ŠPIČEK:

- Připravte kořenový kanálek, potom ho vypláchněte a vysušte.
- Přiložte špičku stříkačky Vitapex na vzdálenost 2–4 mm od apexu. Pro snadnější přístup ke kanálku je možné špičku ohnout.
- Stlačováním pístu postupně nanášíte pastu.
- Během vyplňování kanálku stříkačku pomalu odtahujte.
- Po nanesení pasty do kanálku stříkačku vyjměte a očistěte od veškeré přebytečné pasty.
- Jako při běžném postupu doplňte vyplnění kořenového kanálku korunkovou výplní z materiálů, jako je zinkoxid-eugenolový cement nebo zinkofosfátový cement.

#### Mléčné zuby: případy pulpektomie nebo infikovaného kořenového kanálku:

- Naneste pastu stejnou technikou, jak je popsáno výše. Pamatuje, že bude docházet k fyziologické resorpci kořene. Rychlost resorpce pasty se blíží rychlosti resorpce kořene.

#### U dvojitého kořenového kanálku:

- Stříkačka by měla být zavedena poblíž apexu. Začněte vyplňovat Vitapexem. Když se pasta stočí zpět do dřevové dutiny, stříkačku pomalu vytáhněte. Při manipulaci je třeba postupovat opatrně, aby se pasta nevytlačila.

#### METODA DVOJITÉHO VPYLŇOVÁNÍ S PŘÍPRAVKEM FLEX POINT:

##### Tradiční nebo korunková metoda:

- Po přípravě a vyčištění kořenového kanálku zasuňte špičku stříkačky Vitapex po celé délce kořenového kanálku až do apikální oblasti.
- Stlačováním pístu naneste do apikální oblasti malé množství pasty; pasta apikální oblast pokryje a vydezinfikuje a zároveň stimuluje ukládání a léčbu tvrdých nánosů.
- Zvolte Flex Point, který odpovídá poslednímu nástroji použitému při tvarování kanálku, a vložte jej do kanálku.
- Po umístění nasadte vedle přípravku Flex Point špičku Vitapexu a vstříknete pastu, která vyplní prostor mezi stěnami kanálku.
- Postupně, v souvislosti s tím, jak pasta vyplňuje kanálek, začněte stříkačku vytahovat.
- Jako při běžném postupu doplňte vyplňování kořenového kanálku korunkovou výplní z materiálů, jako je zinkoxid-eugenolový cement nebo zinkofosfátový cement.

#### S přípravkem Flex Point a tmelem:


- V periapikálních částech kanálku použijte Vitapex a vyplňte pevným tmelem Dentalis s přípravkem Flex Point.
- Doporučujeme tmel Dentalis, protože jeho aktivní složky jsou podobné u Vitapexu.

#### DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ:


- Před vložením do kanálku nasadte na stříkačku špičku.
- Po každém použití špičku zlikvidujte a nasadte uzávěr (špičky jsou jednorázové).
- Stříkačku a píst před použitím a po použití vždy vyčistěte ubrouskem napuštěným alkoholem nebo podobným prostředkem.

- Před použitím se ujistěte, že je špička na stříkačku pevně nasazená, a vytlačte malé množství pasty, abyste si ověřili, že ze špičky vytéká. Pokud by špička nebyla nasazená pevně, mohla by se tlakem pístu uvolnit.

- Na píst příliš netlačte. Pokud se špička zdá být ucpaná, vyměňte ji.

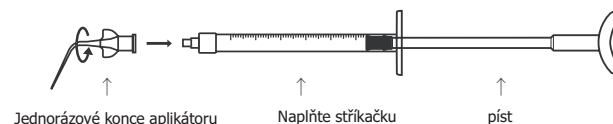

- Na držadlo nádoby lze nasunout zasouvací nástavec; manipulace je pak lehčí a pastu lze snadněji nanášet z jakéhokoli úhlu.

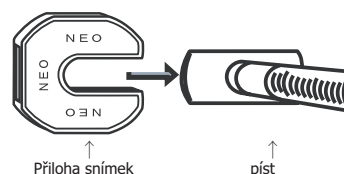

#### POZOR:

- Výrobek nepoužívejte u pacientů, kteří trpí alergií nebo podrážděním na Vitapex nebo jodové sloučeniny.
- Pokud se u pacienta projeví přecitlivělost, přestaňte výrobek používat a kontaktujte lékaře.
- Vitapex se nemá dostat do styku s ústní sliznicí nebo pokožkou. Pokud se do takového styku dostane, odstraňte ho tamponem smočeným v etanolu a potom vypláchněte vodou nebo fyziologickým roztokem.
- Vitapex se nesmí dostat do styku s očima. Pokud ke styku s očima dojde, okamžitě je vypláchněte vodou nebo fyziologickým roztokem a vyhledejte očního lékaře.
- U pacientů, kteří trpí hypertyreózou, je při používání přípravku Vitapex zapotřebí opatrnosti.
- V těhotenství se použití přípravku Vitapex nedoporučuje.
- Elementární jod uvolňovaný z jodoformu se může systémově vstřebávat, takže při přecitlivělosti na jod může způsobit erytémovou vyrážku. Jod může také ovlivnit testy funkce štítné žlázy.
- Nevytlačujte pastu nadměrnou silou; mohli byste pacientovi způsobit akutní bolest.
- Využívejte stupnici, abyste nadbytečnou pastou nepřeplnili apex zubního kanálku.
- Při ošetřování dolních molárů věnujte pozornost poloze mandibulárního kanálu.
- U horních molárů věnujte pozornost poloze čelistní dutiny.
- Vitapex používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.

#### SKLADOVÁNÍ:

- S přípravkem Vitapex smí pracovat a manipulovat pouze školený zubní personál.
- Výrobek skladujte při pokojové teplotě.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Po použití nasadte na stříkačku uzávěr a uložte ji do speciálního neprůsvitného pouzdra.
- Datum použitelnosti je vytištěno na obalu a na štítku.